








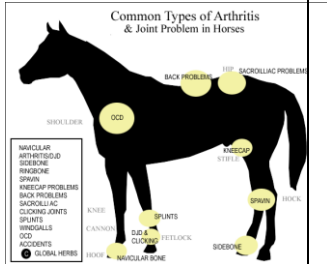

## RevitaVet Behandel protocollen

Abcessen	4 of 3	2		Plaats pad op het abces. Voor hoeven: pads op de kroonrand. Bij een gedraineerd abces stand 3 gebruiken ipv stand 4. 5 minuten per stand.
Acupunctuur punten	7	1		Frequentie 7 wordt gebruikt om de acupunctuur punten te sederen. Voor stimulatie, gebruik stand 1. Beperk de behandelduur tot 10 minuten per sessie.
Artritis	7	5	2	Gebruik de therapie dagelijks gedurende zes weken met normale beweging. Stop na drie weken en houd 1 week pauze.
				Osselets: plaats de pads aan weerszijde van de enkels.
Traumatische artritis	4	7	2	
<b>Artrose</b>	7	4	2	
Avulsie fracturen	7	5	2	(Chips)
Banden (van een gewricht)	5	4	2	Plaats pads op het probleemgebied. Bij veel pijn: evt stand 7 toevoegen
Botten				Zie: fracturen en fissuren
Bursitis	5	4	2	
Cyste	2	4		Bij zeer harde of knokkelige cyste: stand 5 en 2 na 2 <sup>e</sup> dag
Dermatitis, Mok 	3	2		In sommige gevallen is na 1-2 dagen een verergering te zien. Deze "reactieve" fase moet weg zijn na de 4 <sup>e</sup> dag. Gebruik keukenfolie of de pads schoon te houden.
Droes (strangles)	3	4	2	

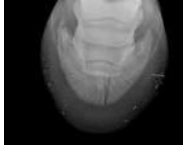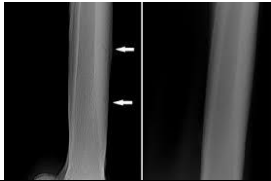

## RevitaVet Behandel protocollen

Enkel letsel				Kijk bij de instellingen voor fracturen, oedeem, bandletsel, artritis, sesamoiditis en gallen
Fracturen: eerste dag volgende dagen 	1 5	2 4	4 2	Fracturen eerst met röntgenfoto bevestigen. Elke 2 weken controle foto. Breuk hoefbeen: plaats pad horizontaal rond de kroonrand. Tweede pad kan geplaatst worden tegen de zool
Fissuren 	5	4	1	Gebruik na behandeling een steun/drukverband. Behandel 7-10 dagen. Stap met het dier dagelijks.
Gallen	4	2		
Gewrichten (joints)	5	4	2	Plaats pads aan beide zijden van het gewricht. Bij veel pijn: gebruik stand 7 als pijnstilling.
Zwelling distaal van de hak 	5	4	2	Ontsteking van de plantaire ligament (achterkant van het been dicht bij de voet) Gebogen zwelling in het ligament tussen de hak en het pijpbeen Zwelling onder de hak Zwelling van of boven de achterste pijpbeen Warmte in het getroffen gebied Lichte kreupelheid (lijkt misschien plotseling voor te doen)
Hoefscheur	5	4	2	(Sand cracks) Pads rond kroonrand en evt op de zool.
Hoefkatrol ontsteking	5	4	2	Plaats een pad horizontaal tegen de hoefballen en een pad tegen de zool. De eerste twee dagen: gebruik 1 ipv 4
Hyperactieve/nerveuze paarden	7	5		Plaats een pad op de navel, over de holtes boven de ogen, boven op het hoofd (achter de oren), of op de neus.
Huidtumor	7	3		sarcoïde
Huidontstekingen en krassen	3	2		
Infecties	2	3		Behandel liefst 2 keer per dag.

## RevitaVet Behandel protocollen

Keelontsteking	2	4	3	
Kneuzingen	2	4	5	Plaats de pad op het letsel. Stand 4 pas gebruiken <b>na</b> de eerste dag
Kneuzingen in de hoef 	2	4	5	Plaats pads over de kroonrand en/of op de zool. Indien de hoef warm aanvoelt: stand 4 <b>niet</b> gebruiken!
Kneuzingen spier	4	5	2	
Kraakbeen	2	4	5	
Laminitis	4	5	2	Plaats pad rond de kroonrand en, indien mogelijk, tegen de zool
(Sub)luxatie van een gewricht	7	4	5	
Litteken weefsel	3	5		
Infecties van mond en slijmvlies	3	2		
Mok 	3	2		
Oedeem	2	4		Gebruik stand 4 vanaf de 2 <sup>e</sup> dag
Ogen	3			Voor oog infectie of beschadiging aan de cornea. Behandel dagelijks 5 minuten tot herstel. <i>Gebruik alleen LED. Nooit laser producten</i>
Osteochondrosis van de knie	5	2	1	
Ovarium hypoactief	1			Indien geen reactie/verbetering: probeer stand 7
Ovarium hyperactief	7			Indien geen reactie/verbetering: probeer stand 1
Operatie	3			Na overleg met DA
Peesontsteking/tendinitis 	2	4	5	Plaats de pad rond het letsel. Na de behandeling is het toegestaan een drukverband aan te leggen. Gebruik niet stand 7 als de kans bestaat dat het dier “te veel” gaat bewegen. In stal kan stand 7 als “pijnstilling” gebruikt worden. Als ontstekingsverschijnselen verdwenen zijn: stand 2 vervangen door stand 5.(5,4,2)
Peesletsel	5	4	2	
Pijnlijke zool	7			Behandel de acupunctuurpunten in de kroonrand 10 min met stand 1

## RevitaVet Behandel protocollen

Rug	7	5	4	Plaats de pad op het gebied dat behandeld moet worden. Indien er een ontsteking in dit gebied zit: vervang de frequentie 7 door 2
Schiefel 	7	2	5	Bij pijn: eerste 2 dagen tijd stand 7 verdubbelen.
Sesamoiditis	5	4	2	
Spierbevangenheid	7			
Straal verwondingen	4	3	2	1 pad rond de kroonrand en 1 pad tegen de straal.
Spat (bone spavin) Dag 1 Dag 2 Dag 3 - herstel	3 7 5	7 5 7	6	Artrose van spronggewricht
Bog Spavin Dag 1 en 2 Dag 3 tot herstel	6 6	2 4	2	 = ontsteking van het slijmvlies van het gewrichtskapsel
Spier scheur	4	5	2	Bij veel pijn: gebruik 7 ipv 4
Tendonitis	5	4	2	
Verklevingen	3	5		Plaats de pads op het aangedane gebied.
Witte lijn ziekte	4	5		White line disease/Seedy toe
Wonden	3	4	2	Bij verse verwonding: stand 3. Indien sereus vocht zichtbaar wordt, is de behandeling voldoende voor de dag. Bij helende wonden, na stand 3 verder gaan met stand 4 en 2
Zwelling thv elleboog agv irritatie door de hoof tijdens liggen	4	2		